

# VITA VMK Master®

Informazione prodotto



VITA Presa del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 10.13

VITA shade, VITA made.

**VITA**

Per il rivestimento estetico di strutture  
metalliche con CET convenzionale.  
Disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER  
e VITA classical A1–D4

**VITA VMK Master®** Con la 3. generazione l'innovazione è la semplicità!



E' un fenomeno noto, che nomi di prodotti diventino concetti di uso corrente. Esempi sono i marchi Tempo, Pampers e Google.

A partire dagli anni 1960 fino ad oggi si è affermato in odontoiatria il termine VMK, riconducibile ad uno sviluppo della VITA: **VITA Metallkeramik** - metallo-ceramica VITA

La VITA Zahnfabrik è stata la prima in Europa a sviluppare e introdurre sul mercato un sistema di rivestimento ceramico per metallo.

**VITA VMK Master®** Ancora migliore.



Dalla soluzione di situazioni relativamente semplici fino a casi clinici complessi e individualizzati – VITA VMK Master è un materiale moderno senza compromessi. Grazie alla temperatura di cottura e alle caratteristiche chimico-fisiche ottimali VITA VMK Master è particolarmente indicata anche per il rivestimento di strutture in leghe non nobili.


**Vantaggi in un colpo d'occhio**

- materiale senza compromessi per quanto riguarda sicurezza ed estetica
- processo di produzione „Master” migliorato per caratteristiche di lavorazione al massimo livello
- classico schema di stratificazione dentina-smalto
- ampia gamma di masse aggiuntive per individualizzazione




Fritta opalescente VITA

**VITA VMK Master®** Stiamo sul classico.

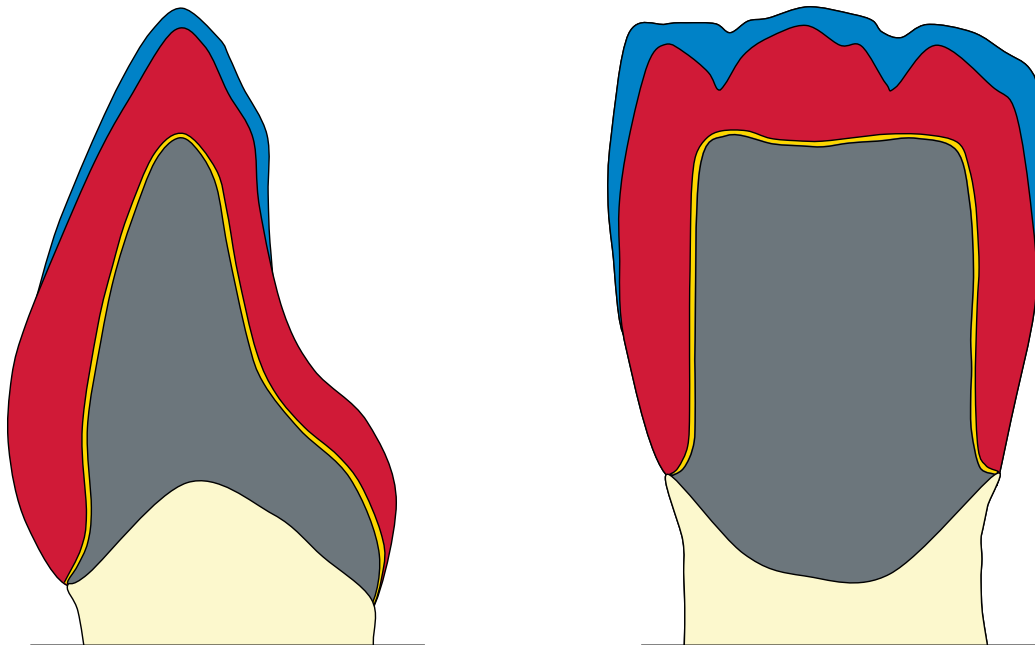

Schema di stratificazione classico

- sicura, rapida e convincente con la stratificazione standard classica
- ampia gamma di masse aggiuntive, come ad es. Luminaries per aumentare la fluorescenza, e masse traslucenti per riprodurre le più diverse trasparenze dello smalto naturale e per effetti di profondità
- migliori presupposti per un'integrazione ottimale nella dentatura naturale residua
- disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4.

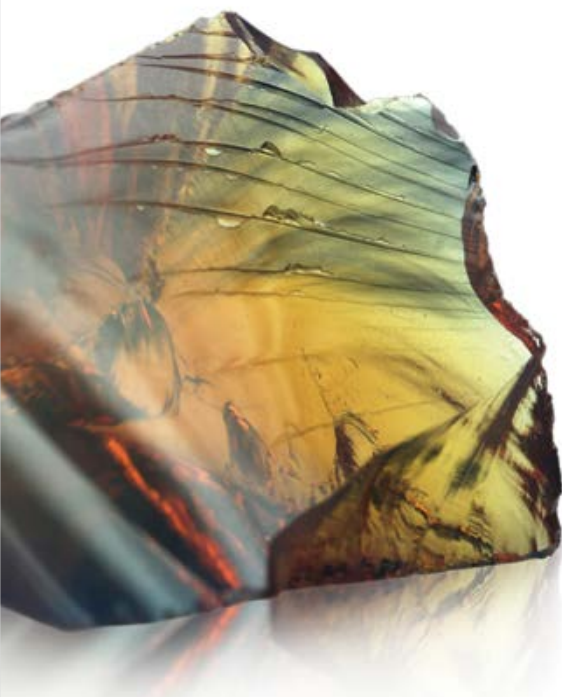

## **VITA VMK Master®** Definizione unanime: versatile.

**Max Pfundner, Germania:**

VITA VMK Master è una ceramica riuscita.

Le masse spalla VITA VMK Master sono superlative. Stabilità di forma assoluta.

**Marcio Breda, Brasile:**

VMK Master mi piace molto. Con questa ceramica la riproduzione dei colori fedele al modello naturale riesce perfettamente.

**Richard Zimmermann, Germania:**

VITA VMK Master è una ceramica molto traslucida che consente effetti di profondità, usarla è divertente. Soprattutto le masse aggiuntive (Dentine Modifier e Translucent) mi hanno entusiasmato.

**Sergio Pontali, Brasile:**

Rispetto al dente naturale il comportamento di riflessione della luce dei restauri in VITA VMK Master è ottimale.

**Francesco Cataldi, Italia:**

VITA VMK Master mi consente di riprodurre immediatamente il colore desiderato. Mi convince soprattutto la stabilità di cottura.



## VITA VMK Master® Correlazione perfetta.

	<p><b>VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER®</b></p> <p>Con VITA SYSTEM 3D-MASTER è possibile determinare in modo spedito e preciso il corretto colore dei denti. VITA Linearguide 3D-MASTER è un'alternativa all'affermata VITA Toothguide 3D-MASTER e si distingue per la disposizione lineare dei campioni colore.</p>
	<p><b>VITA Easyshade® Advance 4.0</b></p> <p>VITA Easyshade Advance 4.0 è l'evoluzione del VITA Easyshade Advance. Lo spettrofotometro digitale consente di determinare il colore dei denti naturali o verificare il colore di restauri in pochi secondi, indipendentemente dalla luce ambiente e dall'utilizzatore. Il colore misurato può essere indicato in VITA classical A1–D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER e nei colori VITABLOC. Scatto automatico della misurazione, Bluetooth®, modalità Bleaching e molte altre novità garantiscono massima precisione, maggiore sicurezza e confort.</p>
	<p><b>Scala colori VITA classical A1–D4</b></p> <p>L'originale – per determinare il colore dei denti in colorazione VITA classical A1–D4.</p>
	<p><b>VITA AKZENT® Plus</b></p> <p>Con i supercolori VITA AKZENT Plus si possono ottimizzare cromaticamente in modo semplice ed efficace tutti i materiali ceramici dentali indipendentemente dal CET.</p>
	<p><b>VITA INTERNO®</b></p> <p>Le masse consentono di realizzare effetti cromatici in profondità. La loro elevata fluorescenza conferisce ai colori una luminosità particolarmente alta.</p>
	<p><b>Unità di cottura VITA VACUMAT® 6000 M</b></p> <p>L'unità di cottura completamente automatica con controllo a microprocessori è idonea per la cottura di tutte le ceramiche dentali. Il forno conquista per altissima qualità ed una serie di novità tecniche per conseguire qualità di cottura, sicurezza operativa, confort e risparmio di tempo massimi. Disponibile in acciaio e laccato antracite.</p>
	<p><b>VITA VACUMAT „New Generation“ – per soluzioni personalizzate flessibili</b></p> <p>Il sistema di cottura modulare comprende l'unità di cottura Premium VITA VACUMAT 6000 M per la cottura di tutti i materiali ceramici e quattro unità di comando, fra cui scegliere, che soddisfano le più svariate esigenze (vPad easy, vPad comfort, vPad excellence, vPad clinical). Con un'unica unità di comando è possibile gestire contemporaneamente fino a quattro forni. L'utilizzatore inizia con i moduli necessari e in qualsiasi momento può decidere di completare il suo sistema con altri componenti (forni, unità di comando, accessori), e quindi è in grado di allestire un sistema di cottura ottimale per le proprie esigenze e altamente produttivo.</p>



**Chi si evolve, ha successo.**


Esigenze crescenti in merito a funzionalità ed estetica dei restauri in metallo-ceramica ci sfidano a sviluppare materiali che consentano all'odontotecnico di ottenere risultati convincenti con un dispendio contenuto. Contemporaneamente devono però esservi ampie possibilità di sofisticata individualizzazione.

VITA VMK 68 e VITA VMK 95 si sono affermate entrambe con successo sul mercato internazionale – oltre 350 milioni di restauri inseriti a partire dal 1968 ne sono la prova.

Ora il successo VMK vive una nuova tappa:  
VITA VMK Master

La metallo-ceramica VITA VMK Master è disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4. E' assicurata la compatibilità cromatica con tutti i materiali VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical.

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

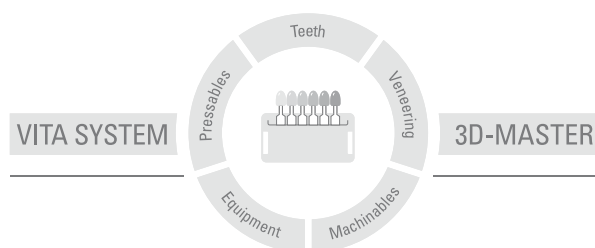

**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori: La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo (colpa in "contrahendo", violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto.

Data di questa informazione per l'uso: 10.13

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA ZAHNFABRIK è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati  0124 :

**VITA VMK Master®** · **VITA AKZENT® Plus** · **VITA INTERNO®**

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)